



Инструкция по сборке стойки с электрическим приводом для портативного рентгеновского аппарата

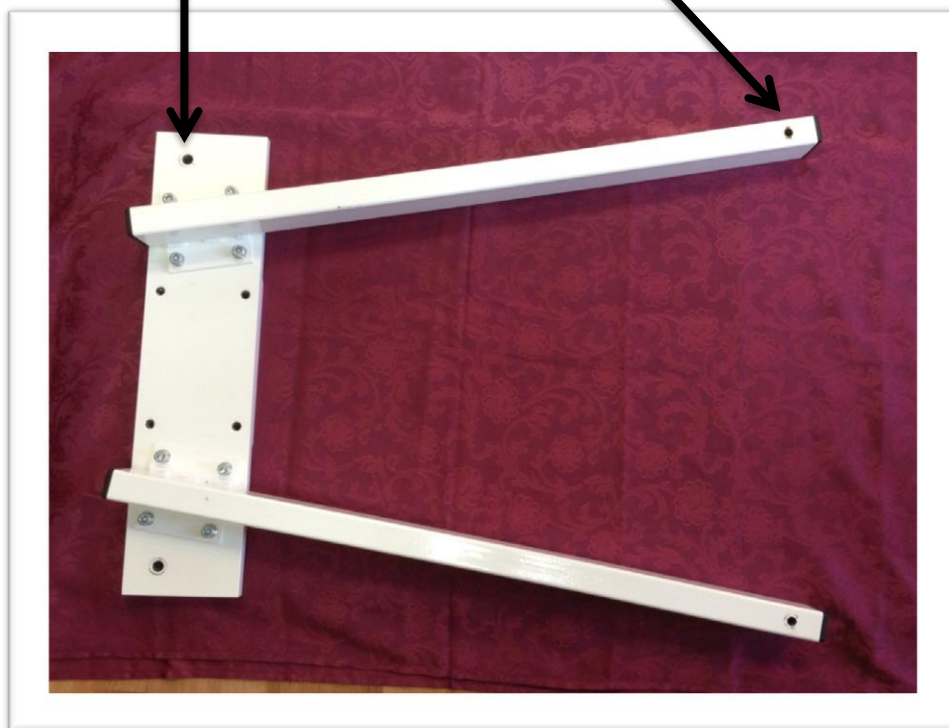


Санкт-Петербург 2013


1 Этап сборки

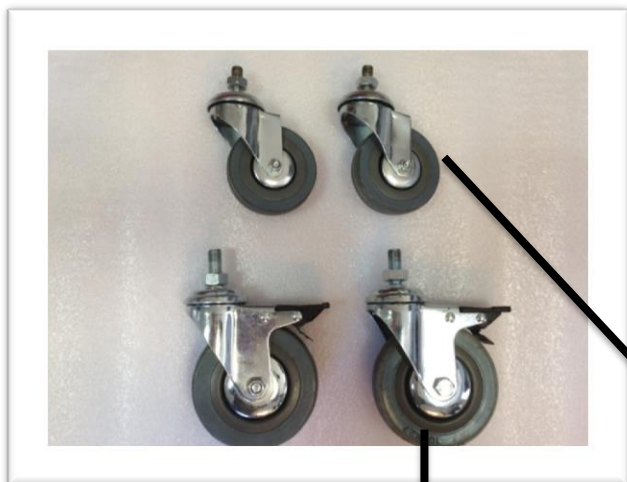


Достаньте из коробки основу стойки, четыре колеса и ключ,
Два больших колеса устанавливаются на широкую
прямоугольную планку, два маленьких колеса на концах
тонких планок.

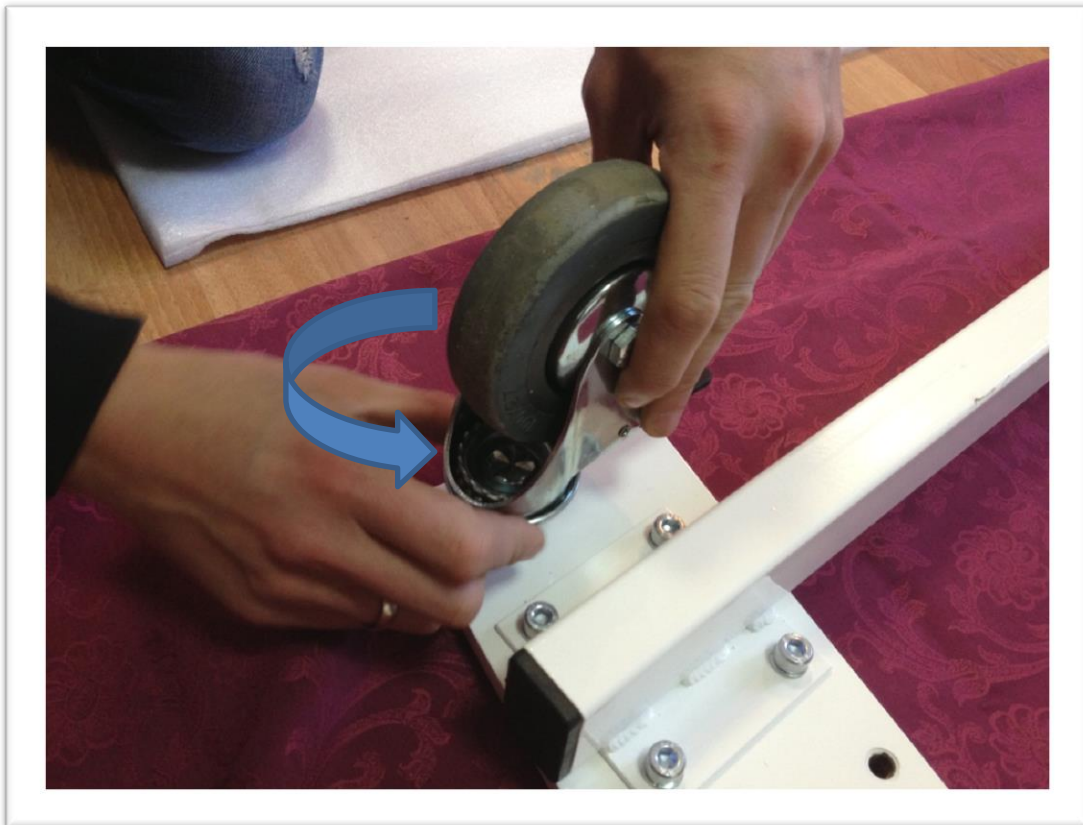

Закручиваем колесо до упора,

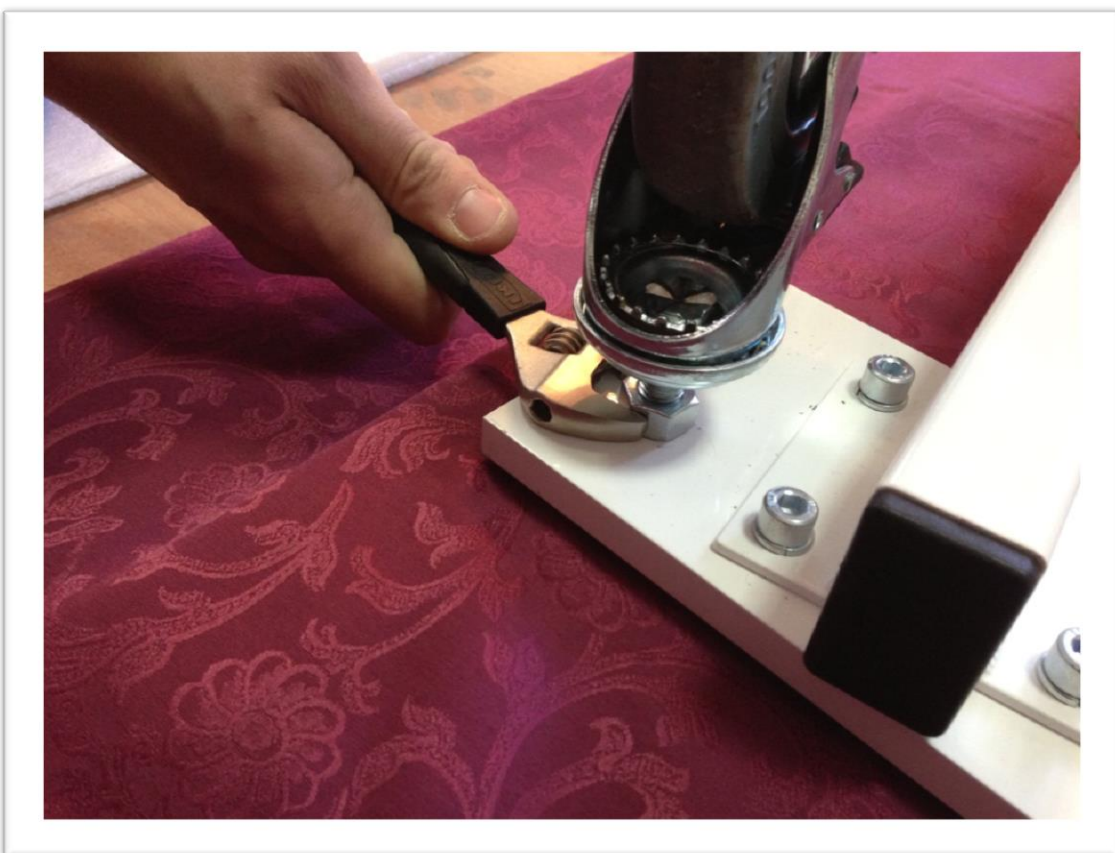

и затягиваем гайку ключом.

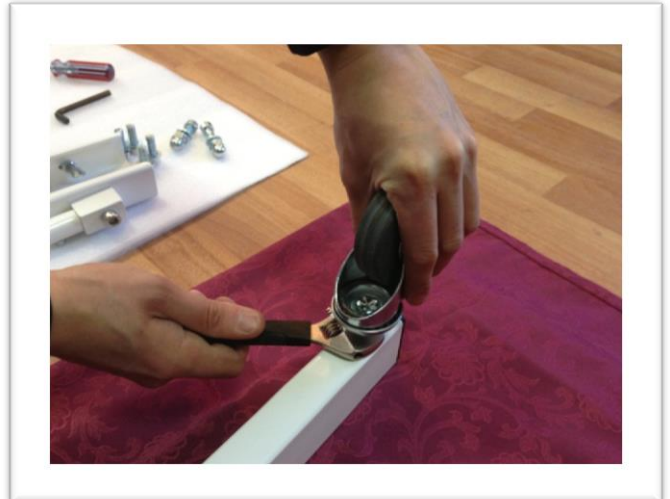

Точно также закручиваем и фиксируем два маленьких колеса на концах тонких планок.



После того как все колеса прикручены переверните основу стойки на колеса.


2 Этап сборки



Для монтажа главной штанги к основе стойке подготовьте шестигранник и четыре винта которые идут к комплекту .




Набор винтов и шестигранник

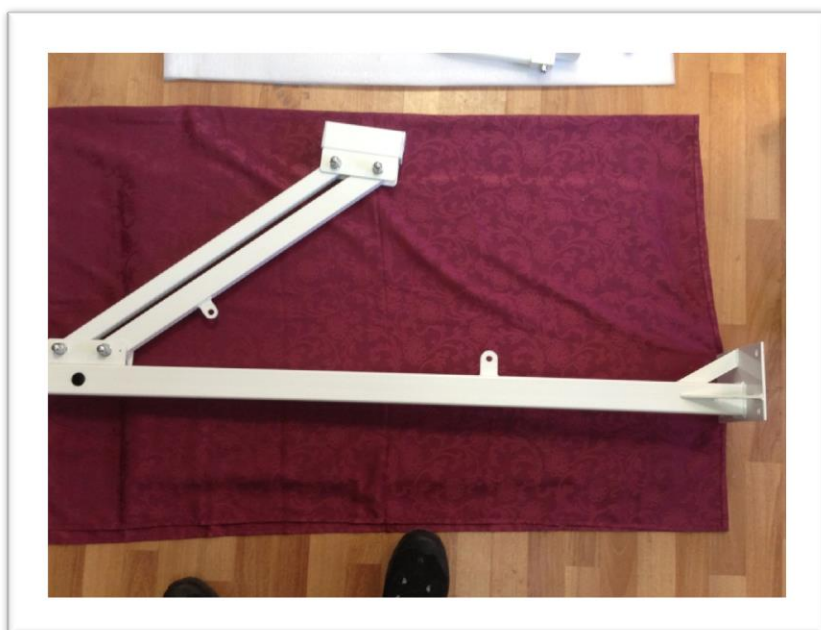

Главная штанга



Устанавливаем главную штангу

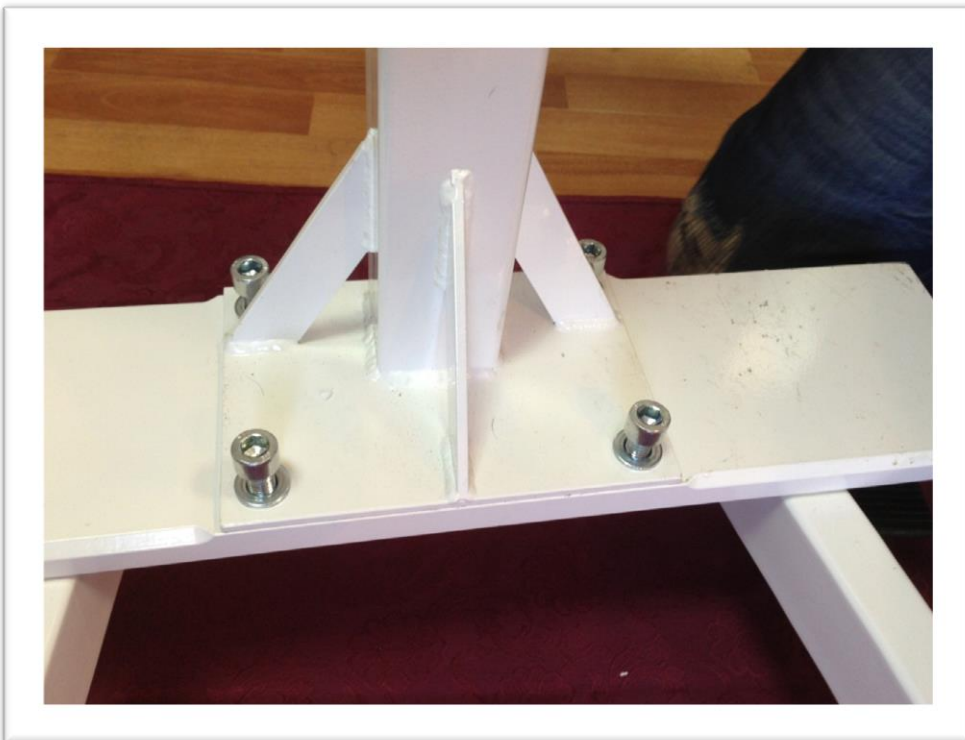

И фиксируем её болтами



Затягиваем болты шестигранником



3 Этап сборки



Монтаж электропривода





Блок питания

Педадь напольная (пульт ручной)


Привод

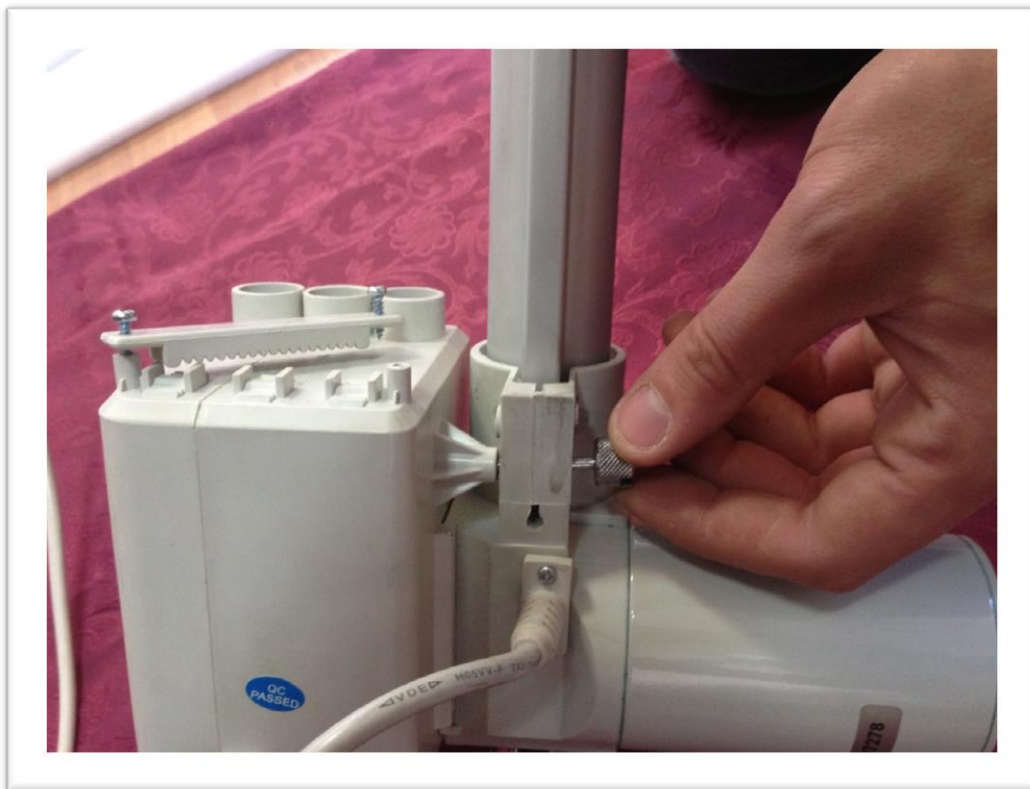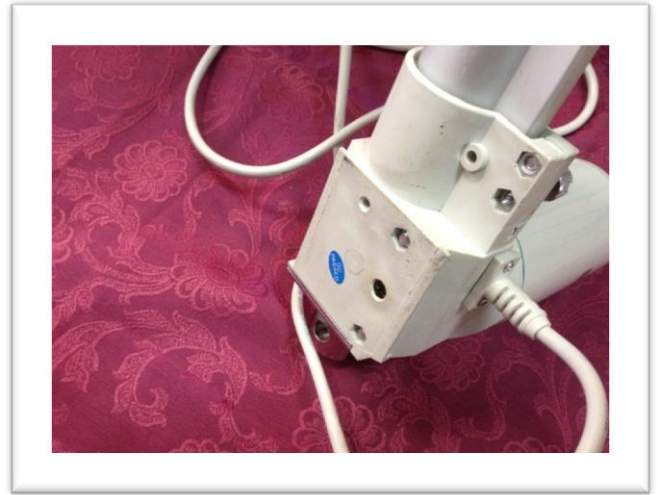

Монтируем блок питания на привод и фиксируем винтом

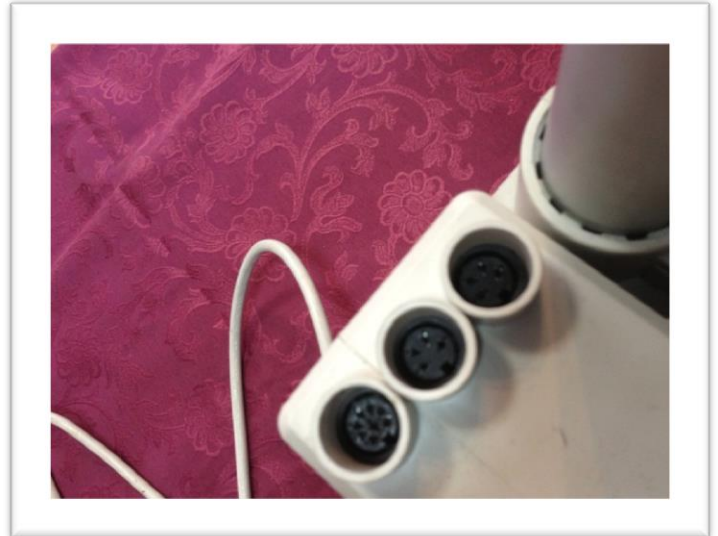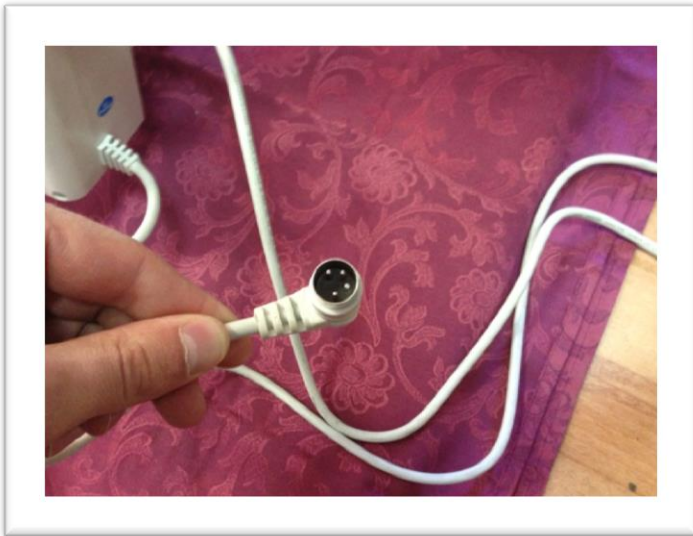

Подключаем блок питания к приводу

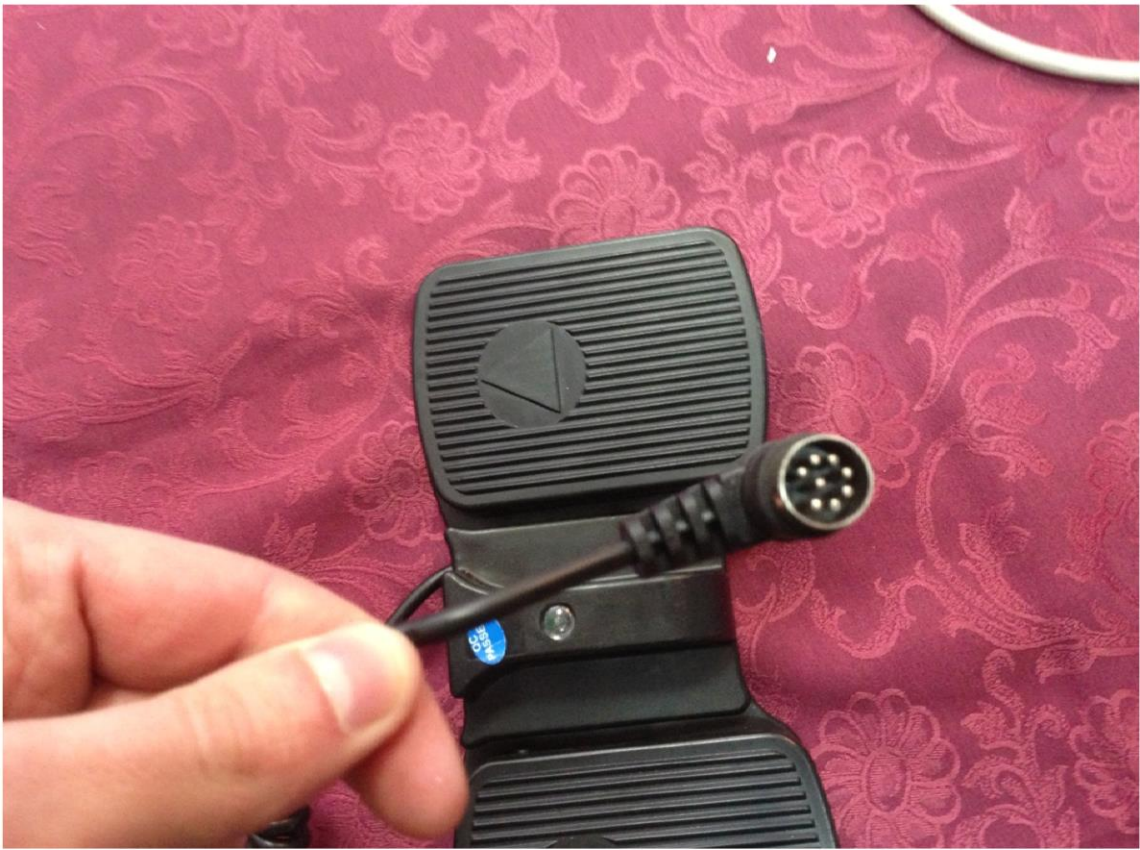

Подключаем педаль (ручной пульт) и фиксируем провода

4 Этап сборки

Монтируем электропривод на
каркас стойки





С помощью ключа и шестигранника фиксируем электропривод к каркасу стойки двумя болтами.





Вставляем ручку





Монтируем «Г»-образную деталь и фиксируем её двумя болтами.





Поздравляем Ваша стойка Собрана!!!!